

STANDARD™ Q COVID-19 Ag Home

Экспресс-тест для определения COVID-19
в домашних условиях




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед анализом необходимо дать тестовой кассете, буферному раствору для экстракции и пробе прогреться до комнатной температуры. Наиболее подходящие условия температуры для проведения анализа соответствуют комнатной температуре (15–25 °С). Если реагенты хранятся при комнатной температуре, их можно открывать и использовать сразу же.


1 Для получения мазка из носовой полости используйте стерильный тампон для взятия мазка из набора.




2 Введите тампон по очереди в обе ноздри, при этом поворачивая его 10 раз, касаясь стенки носовой полости. Тампон необходимо вводить на глубину не более 1,5 см.

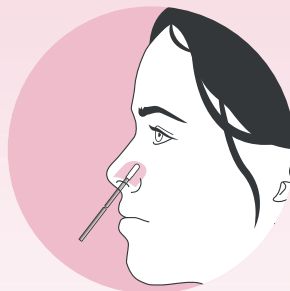

3 Снимите защитную фольгу с пробирки. Вставьте тампон в пробирку с буфером. Сжимая стенки пробирки, поверните тампон более 10 раз. Достать тампон из пробирки, сжимая ее стенки для извлечения жидкости из тампона.

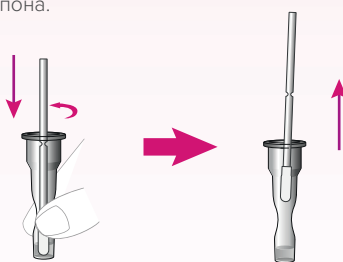

4 Плотно прижмите насадку с капельницей к пробирке.

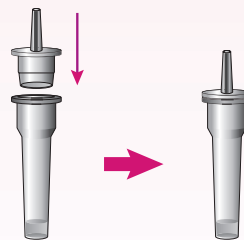

5 Нанесите 4 капли отобранной пробы в окошко для образца на тестовой кассете. Через 15 минут будет четко видна контрольная линия (C), можно проверять результат анализа*.



6 В зависимости от присутствия антигена SARS-CoV-2 в пробе линия теста может окраситься или остаться бесцветной.

**Отрицательный результат:**

Если в окошке проявления результата окрашивается только контрольная линия (C): анализ дал отрицательный результат на наличие антигена к коронавирусу.

**Положительный результат:**

Если в окошке проявления результата окрашивается контрольная линия (C) и линия тестирования (T): анализ дал положительный результат на наличие антигена к коронавирусу.

**Недействительный результат:**

При отсутствии в окошке проявления результата окрашенной контрольной линии (C), результат тестирования является недействительным. В указанных обстоятельствах рекомендуется выполнить повторный анализ с использованием новой пробы и тестовой кассеты.



* Интерпретация результатов теста не допускается, если прошло более 30 минут.

